

HAPPYcover[®]




PAD[®]

COD. AM001N

MADE IN ITALY



30 sec

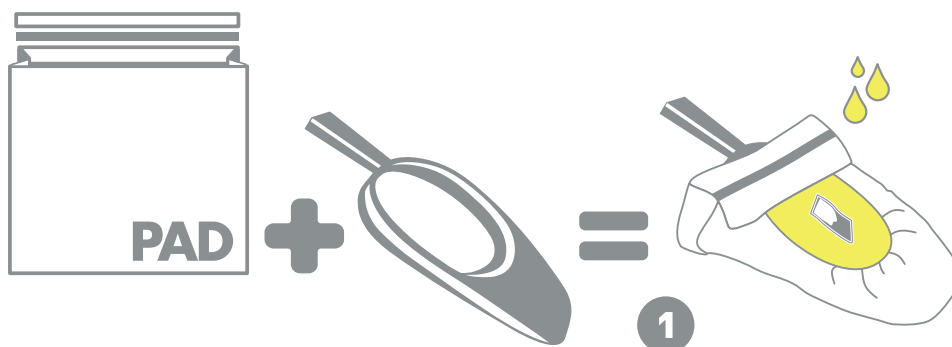

- Happy Cover PAD[®] is applied on bedpan to use. After about 30" the "SGAIEL[®]" molecule gels urines and solids to dispose commonly.
- Happy Cover PAD[®] viene applicato sulla padella da utilizzare. Dopo circa 30" la molecola "SGAIEL[®]" gelifica urine e solidi da smaltire comunemente.

INSTRUCTIONS FOR USE // ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 • Open the bag, position its bottom in the hollow of the bedpan wrapping the border on its rims.
Aprire il sacchetto posizionare il fondo nell'incavo della padella avvolgendo i lembi sui bordi della stessa.
- 2 • After use, close the bag by removing the protective liner and by adhering the adhesive folding the flap.
Dopo l'utilizzo chiudere il sacchetto togliendo il liner di protezione e facendo aderire la parte adesiva ripiegando la padella.
- 3 • If coming from a non-infectious environment, dispose of as solid urban waste.
Se proveniente da ambiente non infettivo, smaltire come rifiuto solido urbano.

PIECES FOR PACKAGE: 20 - COD. AM001N // PEZZI PER CONFEZIONE: 20 - COD. AM001N

Happy Cover PAD[®] is a medical device belonging to the CLASS I and it suits what prescriber by of MDR 2017/745 of 26/05/2021 and put on the market with the CE mark. - Happy Cover PAD[®] è un dispositivo medico appartenente alla CLASSE I ed è conforme a quanto prescritto dalla direttiva MDR 2017/745 del 26 maggio 2021 e viene messo in commercio con marcatura CE.



Product and packaged: ANGIMED S.R.L.
Tel. +39 085 975035 - Fax +39 085 9960203
www.angimed.it - info@angimed.it