



## SGAIEL - POLVERE GELIFICANTE SGAIEL - GELLING POWDER

### SGAIEL in bustine idrosolubili SGAIEL in water-soluble sachets

AM 011 (2 gr)	AM 009 (15 gr)
AM 007 (5 gr)	AM 020 (20 gr)
AM 008 (10 gr)	AM 025 (25 gr)
AM 013 (13 gr)	AM 030 (30 gr)
	AM 050 (50 gr)

### SGAIEL in barattoli e big bag SGAIEL in jars and big bags

AM 005 (200 gr)
AM 004 (400 gr)
AM 006 (1000 gr)
AM 010 (5 Kg)
AM 10 (10 Kg)
AM 1100 (1100 kg - BIG BAG)

### SGAIEL POLVERE - CAPACITÀ DI ASSORBENZA APPROSSIMATIVA E TEMPO DI GELIFICAZIONE SGAIEL POWDER - APPROXIMATE ABSORPTION CAPACITY AND GELIFICATION TIME

2 gr	fino a 200 ml
5 gr	fino a 500 ml
10 gr	fino a 1000 ml
13 gr	fino a 1450 ml
15 gr	fino a 1750 ml
20 gr	fino a 2500 ml
25 gr	fino a 3000 ml
30 gr	fino a 4000 ml
50 gr	fino a 5000 ml

30" (trenta secondi)  
30" (thirty seconds)

30 sec



### ISTRUZIONI PER L'USO // INSTRUCTIONS FOR USE

- Mettere la quantità adeguata (vedi tabella "Capacità di Assorbenza"), di polvere super assorbente gelificante SGAIEL all'interno del dispositivo destinato alla raccolta di liquidi organici o sopra liquidi organici sversati. Attendere 30" (trenta secondi) e quando i liquidi sono addensati/gelificati procedere, con la rimozione e lo smaltimento seguendo la profilassi adeguata al rifiuto in oggetto.
- Put the adequate quantity (see table "Absorbency Capacity") of super absorbent powder gelling SGAIEL thickening powder inside the device intended for the collection of organic liquids or over spilled organic liquids. Wait 30" (thirty seconds) and when the liquids have thickened / gelled proceed with the removal and disposal following the appropriate prophylaxis for the waste in question.
- Se proveniente da ambiente non infettivo, smaltire come rifiuto solido urbano.
- If coming from a non-infectious environment, dispose of as solid urban waste.

• **SGAIL**® polvere polvere super assorbente gelificante è un dispositivo medico appartenente alla CLASSE I ed è conforme a quanto prescritto dalla direttiva MDR 2017/745 del 26 maggio 2021 e viene messo in commercio con marcatura CE.

• **SGAIL**® super absorbent gelling powder is a medical device belonging to CLASS I and it suits what prescribed by of MDR 2017/745 of 26/05/2021 and put on the market whit the CE mark..



Product and packaged: ANGIMED S.R.L.  
Tel. +39 085 975035 - Fax +39 085 9960203  
www.angimed.it - info@angimed.it